



ULOTKA INFORMACYJNA

Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

Ocieplacze - pasy ocieplające na biodro :

- *maxi*

- *pełny maxi*

Przeznaczenie :

Wyroby znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej osób dotkniętych :
zwrodnieniami kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, zapaleniem korzonków nerwowych, schorzeniami nerek i pęcherza.

Użytkowanie :

Zaleca się stosować przedmiotowe wyroby po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu ciepłego. Wyroby poprzez wygrzanie tkanek doprowadzają do zmniejszenia napięcia mięśni, pobudzają zakończenia nerwowe w tkankach, przez co łagodzą dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, kojąco wpływają na schorzenia nerek i pęcherza. Służą do codziennego użytku.

Przeciwwskazania :

Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.

Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

Ostrzeżenia :

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i ran otwartych.

Przepis prania :



Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.

Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.

Suszyć w stanie rozwieszonym. Nie wirować. Nie prasować.

Można czyścić chemicznie.

Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach.

Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.



Skład surowcowy :
okrywa: wełna 100 %

Wyrób posiada:

- certyfikat Zdgodności dla wyrobu medycznego Nr 13/M/2009, Nr 6/M/2010
- certyfikat „Przyjazny dla Środowiska i Człowieka” Nr 6/PSC/2012
- opinię Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„RUNO” - Jan Widz
34-340 Przyborów 50
Tel. 033/863 94 21
Fax 033/863 92 52

Data opracowania instrukcji : VII/ 2012