

ULOTKA INFORMACYJNA



Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

Ocieplacze pozabiegowe:

- *dlugie i krótkie*
- *ocielacze bez rękawów*
- *ocielacze dlugi rękaw*
- *bolera*
- *ocielacz – śpiwór*

Przeznaczenie:

Wyroby znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej osób dotkniętych chorobą reumatoidalną, zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa, nerwobólach pourazowych, bólach reumatycznych. Służą do codziennego użytku.

Użytkowanie:

Poprzez ogrzanie i delikatny masaż zmniejszają napięcie mięśni, pobudzają zakończenia nerwowe, łagodzą bóle pochodzenia reumatycznego i zwiększają zakres ruchów w stawach. Ocieplacze mają zastosowanie po zabiegach fizykalnych (parafinoterapii, kąpielach, elektroterapii) w celu przedłużenia działania efektu ciepłego.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

Ostrzeżenia

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i otwartych ran.
W przypadku używania ocieplaczy przez małe dzieci należy zwracać uwagę na możliwość oderwania zapięć – guzików lub kołków.

Przepis prania :



Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
Suszyć w stanie rozwieszonym. Nie wirować. Nie prasować.
Można czyścić chemicznie.

Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach.
Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.



Skład surowcowy :
okrywa: wełna 100 %

Wyrób posiada:

- certyfikat Zgodności dla wyrobu medycznego Nr 13/M/2009, Nr 6/M/2010
- certyfikat „Przyjazny dla Środowiska i Człowieka”
- opinię Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„RUNO” - Jan Widz
34-340 Przyborów 50
Tel. 033/863 94 21
Fax 033/863 92 52

Data opracowania instrukcji : VII/ 2012