



ULOTKA INFORMACYJNA

Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

Ocieplacze stóp :

- skarpety
- kaptcie

Przeznaczenie:

Wyroby znajdują zastosowanie w rehabilitacji leczniczej dla osób przy schorzeniach mięśni i układu kostno-stawowego stopy i podudzia, schorzeniach naczyniowych i tętniczo-żylnych (niedokrwienie kończyn przy cukrzycy, chorobie Burgera i Raynauda) oraz dla osób ze skłonnościami do nadmiernego pocenia się stóp i tak zwanych „zimnych stopach”

Użytkowanie:

Zaleca się stosować przedmiotowe wyroby po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu ciepłego. Wyroby poprzez ogrzanie i delikatny masaż pobudzają zakończenia nerwowe, poprawiają działanie mięśni, przyspieszają zanikanie obrzęków, łagodzą dolegliwości sztywności stawowej i pourazowej. Zapobiegają rozwojowi grzybicy stóp. Służą do codziennego użytku.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

Ostrzeżenia

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i otwartych ran.

Przepis prania :



Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
Suszyć w stanie rozwieszonym. Nie wirować. Nie prasować.
Można czyścić chemicznie.

Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach.
Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.



Skład surowcowy :
okrywa: wełna 100 %

Wyrób posiada:

- certyfikat Zgodności dla wyrobu medycznego Nr 13/M/2009, Nr 6/M/2010
- certyfikat „Przyjazny dla Środowiska i Człowieka” Nr 6/PSC/2012
- opinię Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„RUNO” - Jan Widz
34-340 Przyborów 50
Tel. 033/863 94 21
Fax 033/863 92 52

Data opracowania instrukcji : VII/ 2012