



ULOTKA INFORMACYJNA

Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

Ocieplające wyroby pościelowe:

- koce
- koldry

Przeznaczenie:

Wyroby pościelowe wełniane mogą być zastosowane w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce u osób dotkniętych : chorobami reumatoidalnymi i zwyrodnieniowymi stawów i kręgosłupa, zapaleniem mięśni, ścięgien i więzadeł; dróg moczowych, porażeniem nerwów, zaburzeniami krążenia, nerwobólach pourazowych (złamania, zwichnięcia, uszkodzenia tkanek miękkich); niedowładami i porażeniem spastycznym po złamaniach kręgosłupa oraz dla osób ze skłonnościami do nadmiernego pocenia się, uczulonych na pierze i roztocze.

Użytkowanie:

Zaleca się stosować przedmiotowe wyroby po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu ciepłego oraz do codziennego użytku, ponieważ mięśnie i stawy zmienione chorobowo poddawane są stałemu, łagodnemu ciepłu poprawiającemu krążenie, zmniejszając napięcie i ból. Ponadto wyroby pościelowe wełniane zabezpieczają warunki higieniczne podczas spania z uwagi na dobrą przepuszczalność powietrza oraz dużą higroskopijność włókien wełnianych, co uniemożliwia zawilgocenie oraz rozwój roztoczy, utrzymując stałą temperaturę ciała podczas snu zapewniając spokojny i głęboki sen.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

Ostrzeżenia

Dla niemowląt i małych dzieci oraz osób wrażliwych na działanie wełny zaleca się użytkowanie wyrobów wełnianych powleczonej w poszewki z tkanin bawełnianych. Zabezpieczy to również przed dostaniem się luźnych włókien wełnianych do oczu, nosa i gardła oraz związanego z tym nieprzyjemnego efektu drażniącego.

Przepis prania :



Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
Suszyć w stanie rozwieszonym. Nie wirować. Nie prasować.
Można czyścić chemicznie.

Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach.
Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.



Skład surowcowy :
okrywa: wełna 100 %

Wyrób posiada:

- certyfikat Zgodności dla wyrobu medycznego Nr 13/M/2009, Nr 6/M/2010
- certyfikat „Przyjazny dla Środowiska i Człowieka”
- opinię Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„RUNO” - Jan Widz
34-340 Przyborów 50
Tel. 033/863 94 21
Fax 033/863 92 52