



## ULOTKA INFORMACYJNA

### Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

#### Podpory siedziska : - podkłady na siedzenie

Wyroby wykonane są z dzianiny futerkowej z okrywą włókienną ze 100% czystej żywej wełny w kolorze naturalnym i/lub barwionej, podkład – 100% poliester, wypełnienie - ścinki wełniane lub włókno poliestrowe.

#### Przeznaczenie:

Wyroby wełniane mogą być zastosowane w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce u osób dotkniętych : porażeniem kończyn dolnych i zaburzeniami troficznymi jeżdżących na wózkach inwalidzkich, zeszywniającym zapaleniem mięśni, skutkami urazów (złamań, deformacji, niestabilnością stawów), zapaleniem dróg moczowych, porażeniem nerwów oraz zaburzeniami krążenia.

#### Użytkowanie:

Szorstka powierzchnia runa owczego pobudza zakończenia nerwowe i poprawia działanie mięśni. Stałe łagodne ciepło poprawia krążenie obwodowe i trofikę. Zabezpiecza prawidłowe oddychanie skóry i zapobiega nadmiernej potliwości ud i pośladków. Służą do codziennego użytku.

#### Przeciwwskazania

Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.  
Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

#### Ostrzeżenia

Nie należy przykładać wyrobów wysokorunnych do miejsc skaleczonych i otwartych ran.

#### Przepis prania :



Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.  
Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.  
Suszyć w stanie rozwieszonym. Nie wirować. Nie prasować.  
Można czyścić chemicznie.

Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach.  
Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.



Skład surowcowy :  
okrywa: wełna 100 %

Wyrób posiada:

- certyfikat Zgodności dla wyrobu medycznego Nr 13/M/2009, Nr 6/M/2010
- certyfikat „Przyjazny dla Środowiska i Człowieka” Nr 6/PSC/2012
- opinię Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

**Wytwórca:**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe  
„RUNO” - Jan Widz  
34-340 Przyborów 50  
Tel. 033/863 94 21  
Fax 033/863 92 52

Data opracowania instrukcji : VII/ 2012